

OTTO

新世代電動代步車

快速使用指南

歡迎加入



movinglife[™]

www.smartride.com.tw

恭喜您！

您將開始使用靈活且高性能
的電動代步車！



請您充分享受騎乘ATTO新世代電
動代步車的美好，我們隨時竭誠
為您服務。

www.smartride.com.tw/video


開箱流程：

- 先平放整個箱子然後打開箱蓋，接著會看到在箱子頂部的左側和右側有兩個隔層空間，電池在左側的盒中，充電器和潤滑劑瓶在右側的盒中。
- 在箱子中間，會看到裝在透明袋子的使用手冊，其中包含有關ATTO的所有相關資訊，另外還有一份飛行安全證書小冊子（黃色的），內容為ATTO登機時所需的相關資訊。
- 將以上物品與箱內保護紙板取出後，將箱子整個立起來（請注意輪子位置在下方），接著打開內蓋，就能握住ATTO的黑色牽引握把，將其從包裝盒中滑出。

現在您已取得以下所有物品：ATTO新世代電動代步車、電池、充電器、潤滑劑、使用手冊。


展開代步車：

1. 鬆開駕駛控制台側邊調節桿，使駕駛控制台直立，然後將調節桿回到固定位置。

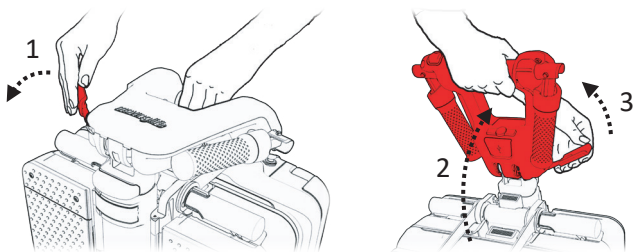


現在您將展開ATTO成為駕駛模式

2. 按下小的紅色按鈕（橫桿解開按鈕）打開駕駛控制台握把，然後傾斜脫離ATTO主體，無需用力即可進行操作。

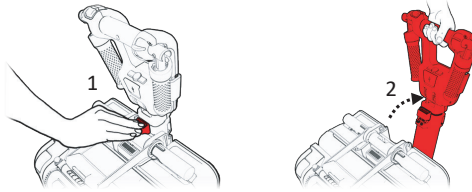


3. 按下大的紅色按鈕（中央解開按鈕）。

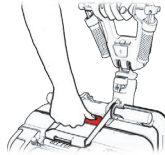


以下說明適用於慣用右手的使用者（如果您是慣用左手的，請用另一隻手操作）。

4. 用左手握住牽引握把，用右手握住ATTO機體上的主握把。

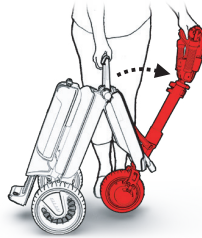


一開始，這部分動作也許會有點不流暢，可反覆練習幾次即能輕易上手！

5. 向左邊傾斜ATTO並將左手的前輪稍微抬起，直到聽到喀噠聲。
6. 聽到喀噠聲時，表示前輪已經接觸地面，左手可以不用再出力上提。
7. 左手仍握住牽引握把，接著握著主握把的右手將ATTO往地面方向推，之後可鬆開右手，讓後輪向右順勢滑動到完全展開為止。
8. 將駕駛控制台保持在直立的位置，然後換用右手握住牽引握把，再用左手按下前拉桿（下圖中的紅色圖示），以將駕駛控制台鎖定到位（請確保整座駕駛控制台為垂直時再執行此操作）。

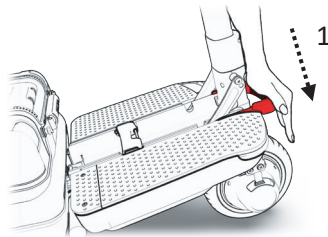


打開座椅


9. 用左手握住牽引握把，用右手滑動後拉桿的安全扣（下方圖1），將後拉桿抬起並保持90度（不要超過90度，因為會鎖定開啟機制。如果聽到“喀噠”聲，就表示打太開了），接著抬起後拉桿，將座椅一直後拉（龍頭的反方向），直到鎖定。

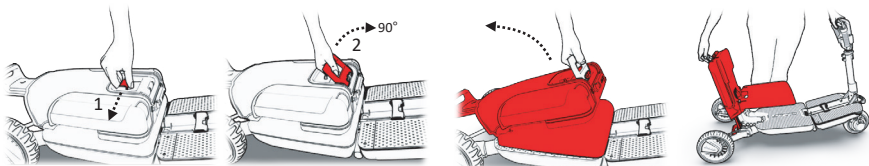

10. 抓住後拉桿，將椅子抬起至就座位置（聽到卡榫卡住的聲音，表示已定位）。

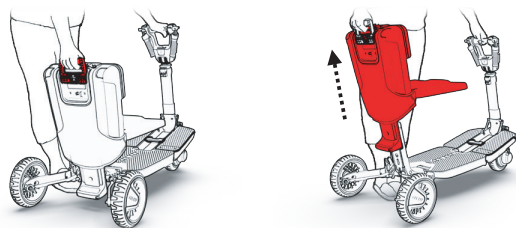


11. 從包裝中取出電池，然後放入ATTO踏板左前側的空電池槽中；先插入電池的後部，然後向後滑動到底後輕輕向下推，直到聽到喀噠聲為止。

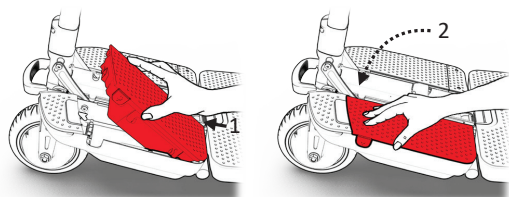


現在可以坐上ATTO了


12. 將您的手放在黑色牽引握把上，另一隻手打開高度調整桿（位於駕駛控制台前方），接著調整駕駛控制台到適合的高度，然後合上高度調整桿。

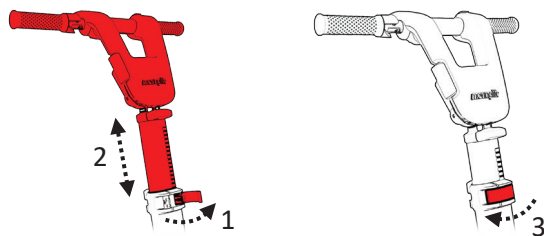

13. 把駕駛握把往外側向上提起即可打開。

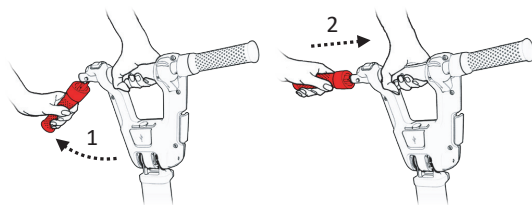


14. 現在，您可以調整駕駛控制台的角度的 - 握住駕駛控制台並打開側邊調節桿到底。將角度調整至舒適駕駛模式，然後關上調節桿。

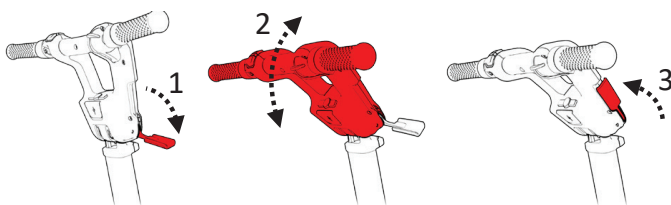


您的ATTO已準備就緒！

15. 請看ATTO的駕駛控制台，按下”開/關”電源按鈕（左下方的圖上的圓形按鈕），直到面板上燈號亮起。您看到的數字是目前設定的速度，您可以透過”+”或”-“按鈕來調整速度，我們建議以低速啟動。在左上方駕駛握把旁會看到兩個按鈕，一個是提醒喇叭按鈕，另一個是行駛方向按鈕，如果按下方向按鈕，可以向前和向後更改行駛方向（在駕駛控制台面板會出現前或後箭頭的方向）。

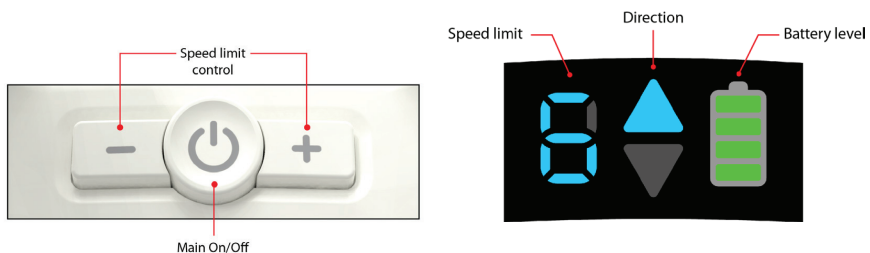


16. 用右手拇指操作油門-如果向下按到底，會是目前設定速度的最高速。可以透過按油門的程度來控制實際速度。

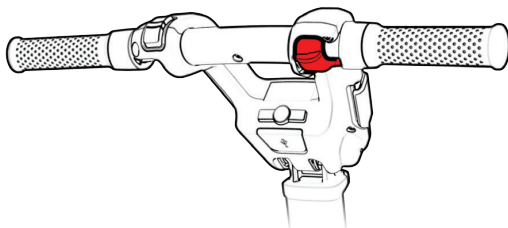


17. 停止-鬆開油門，ATTO就會自動煞車。

收合ATTO：


18. 首先，先關閉您的ATTO，請按下“開/關”電源按鈕，並確認指示燈熄滅。
19. 將駕駛控制台回到直立的位置：打開側邊調節桿，將控制台提起至垂直位置，然後關上調節桿。
20. 折疊駕駛握把：握住握把往外拉開，並向下折接近90度角，就會自動鎖定收合。

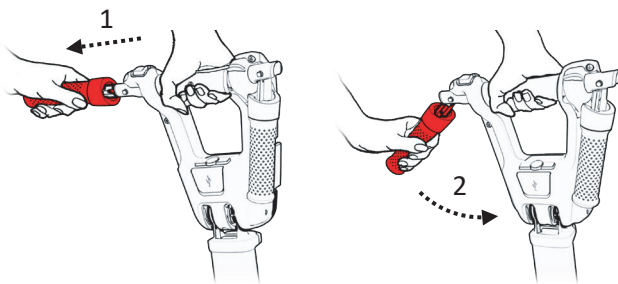


-
21. 握住駕駛控制台並打開側邊調節桿到底，將駕駛控制台輕輕向下推到底，關上調節桿。

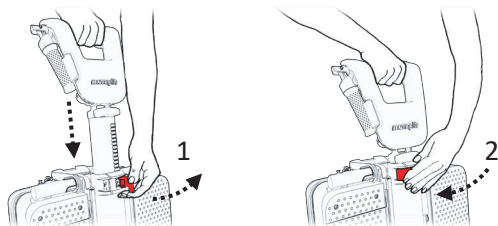

22. 接著移到椅子後面，滑動後拉桿的安全扣並同時輕鬆地將拉桿調至90度，在握住的同時將椅子向下推到底，然後將您的手放在椅背上把機體一直向下推到底。

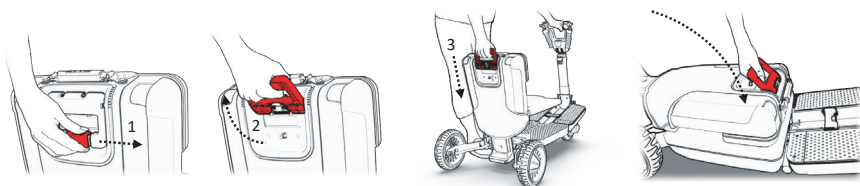


23. 走到車子前面，用一隻手握住黑色牽引握把，另一隻手將前拉桿提起打開，解開整座駕駛控制台的鎖定。然後一隻手握住黑色牽引握把，另一隻手拉起機體中間的主握把以收合ATTO。

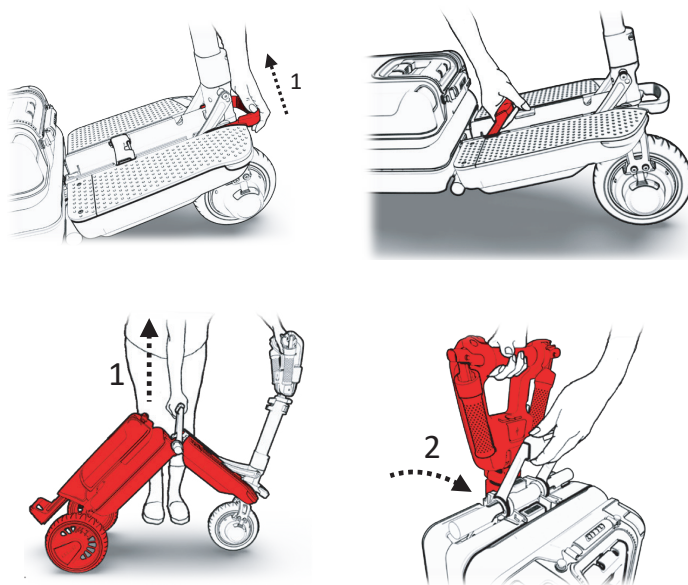


分離模式：

機體可以前後分離是ATTO最大的特色，讓您可以輕易搬上車，跟隨您到各地使用。

1. 先將ATTO收折起來，並將駕駛控制台調整至直立的位置。

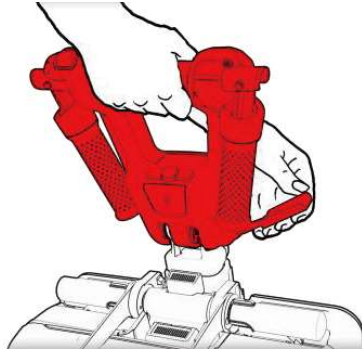


-
2. 打開兩側分離桿

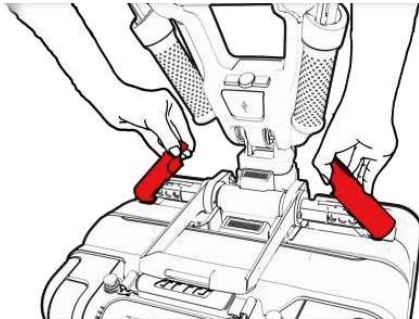


-
3. 一隻手握住駕駛控制台握把，另一手按下中央解開按鈕（紅色按鈕）



4. 即可將ATTO前後分離。

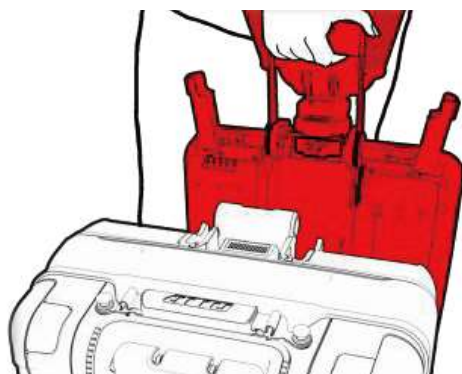


5. 在搬運時，務必兩手一上一下抓取，如下圖指示處進行搬運。

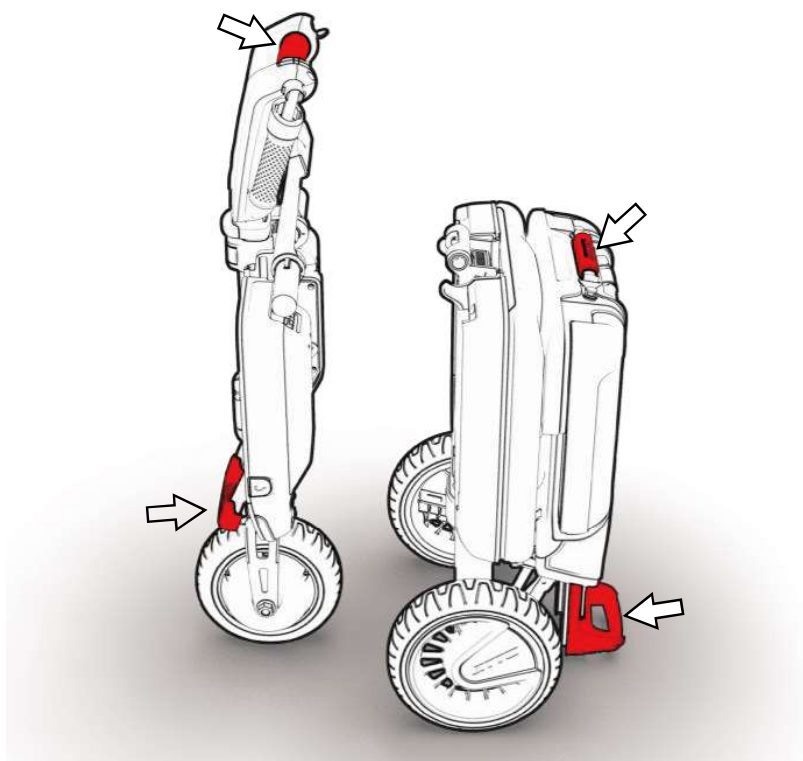

傳動輪（前輪）操作：

萬一電池沒電或ATTO沒有驅動時，ATTO可以調整成手動移動，這將需要釋放前輪的機械式自動剎車，將輪子側邊的調節桿推向模式"N"即可。要再次啟動駕駛之前，請確認有將調節桿推回模式"D"。

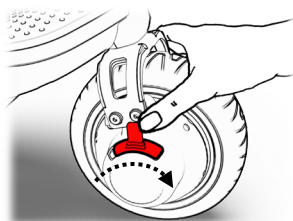

調節桿推向模式"N"，
釋放前輪的機械式自動剎車



啟動前請確認有將調節桿推
回模式"D"



www.smartride.com.tw/video

在我們完整的《使用手冊》或官方網站上，您可以找到有關以下方面的更多資訊，例如：如將ATTO拆分為兩部分、旅行、搭乘飛機、安全性，以及更多相關資訊。祝您安全、愉快！

本快速使用指南不能完全代替ATTO的《使用手冊》。
在操作ATTO之前，請仔細閱讀。

movinglife[™]

movinglife® ATTO新世代電動代步車

錯誤代碼說明

錯誤代碼	嚴重程度	問題原因及解決方式
	低	電源啟動後，若前輪調節桿處於N檔(空檔)狀態並按下電門即顯示 E1，請將前輪調節桿推回D檔即恢復駕駛模式。 
	低	同時按下「電源按鈕」及「電門」會使電腦進行自動保護安全模式並顯示 E2，請放開電門並重新啟動電源按鈕。
	高	馬達負載過多即顯示 E3，請關閉電源按鈕後10分鐘再重新啟動。
	低	USB連接口出現問題即顯示 E4，請移除USB連接口上的裝置、檢查USB連接口是否受潮，問題排除後重新啟動電源按鈕。
	高	內部線路或控制盒出現問題即顯示 E5，請與Moving Life台灣總代理-韋克有限公司的技術支援小組聯繫。
	低	控制盒過熱即顯示 E6，請關閉電源按鈕於10分鐘後重新啟動。
	低	控制盒偵測到低電壓即顯示 E7，此可能是電池電量不足所導致，請關閉電源按鈕以及將電池充滿電後再重新啟動。
	高	馬達故障即顯示 E8，請與Moving Life台灣總代理-韋克有限公司的技術支援小組聯繫。
	無	提醒軟體需升級為最新版本即顯示Fd，請與Moving Life台灣總代理-韋克有限公司的技術支援小組聯繫。