

ATTO SPORT

新世代電動代步車 SPORT升級版

快速使用指南

歡迎加入



movinglife[™]

恭喜您！

您將開始使用靈活且高性能
的電動代步車！



請您充分享受騎乘ATTO新世代
電動代步車的美好，我們隨時
竭誠為您服務。

www.smartride.com.tw


開箱流程：

- 先平放整個箱子然後打開箱蓋，將箱內保護紙板取出後，把箱子整個立起來（請注意輪子位置在下方），接著打開內蓋，就能握住ATTO的黑色牽引握把，將其從包裝盒中滑出。
- 配對2副遙控鎖及車尾警示燈的充電線，隨車放於駕駛控制台把手上的袋子內。
- 配件盒內有ATTO SPORT的電池、充電器、潤滑劑瓶和使用手冊，以及飛行安全證書黃色小冊子，內容為ATTO登機時所需的相關資訊。

現在您已取得以下所有物品：ATTO新世代電動代步車、遙控鎖、電池、充電器、潤滑劑、使用手冊。


展開代步車：

1. 鬆開駕駛控制台側邊調節桿，使駕駛控制台直立，然後將調節桿回到固定位置。

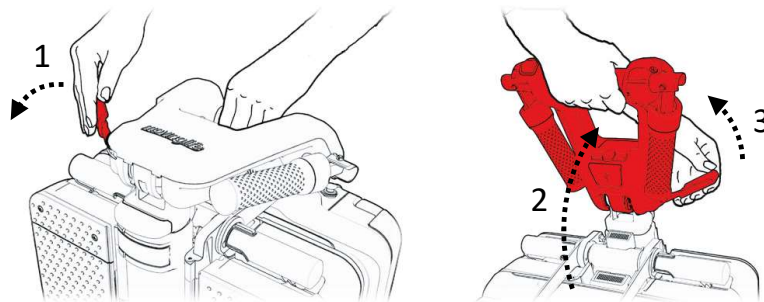


現在您將展開ATTO成為駕駛模式

2. 按下小的紅色按鈕（橫桿解開按鈕）打開駕駛控制台握把，然後傾斜脫離ATTO主體，無需用力即可進行操作。

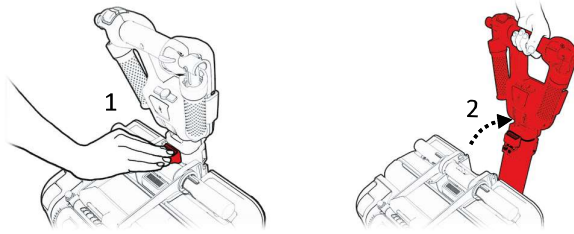

3. 按下大的紅色按鈕（中央解開按鈕）。

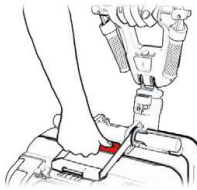


以下說明適用於慣用右手的使用者（如果您是慣用左手的，請用另一隻手操作）。

4. 用左手握住牽引握把，用右手握住ATTO機體上的主握把。




一開始，這部分動作也許會有點不流暢，可反覆練習幾次即能輕易上手！

5. 向左邊傾斜ATTO並將左手的前輪稍微抬起，直到聽到喀噠聲。
6. 聽到喀噠聲時，表示前輪已經接觸地面，左手可以不用再出力上提。
7. 左手仍握住牽引握把，接著握著主握把的右手將ATTO往地面方向推，之後可鬆開右手，讓後輪向右順勢滑動到完全展開為止。
8. 將駕駛控制台保持在直立的位置，然後換用右手握住牽引握把，再用左手按下前拉桿（下圖中的紅色圖示），以將駕駛控制台鎖定到位（請確保整座駕駛控制台為垂直時再執行此操作）。

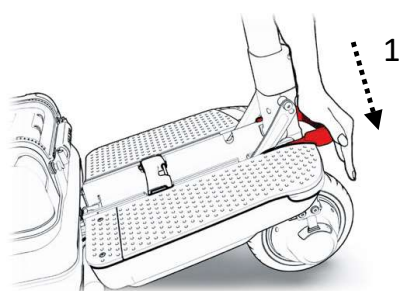


打開座椅


9. 用左手握住牽引握把，用右手滑動後拉桿的安全扣（下方圖1），將後拉桿抬起並保持90度（不要超過90度，因為會鎖定開啟機制。如果聽到“喀噠”聲，就表示打太開了），接著抬起後拉桿，將座椅一直後拉（龍頭的反方向），直到鎖定。

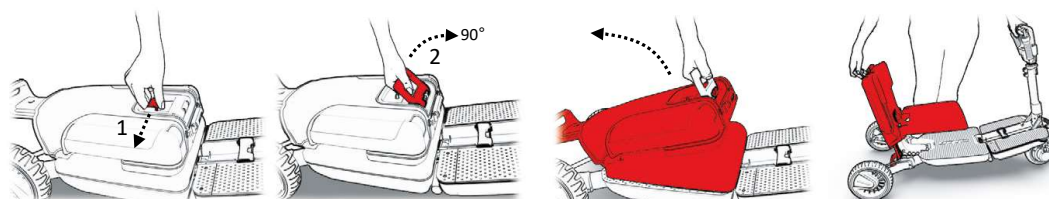

10. 抓住後拉桿，將椅子抬起至就座位置（聽到卡榫卡住的聲音，表示已定位）。

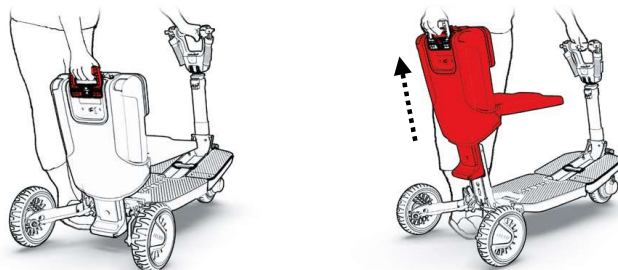


11. 從包裝中取出電池，然後放入ATTO踏板左前側的空電池槽中；先插入電池的後部，然後向後滑動到底後輕輕向下推，直到聽到喀噠聲為止。

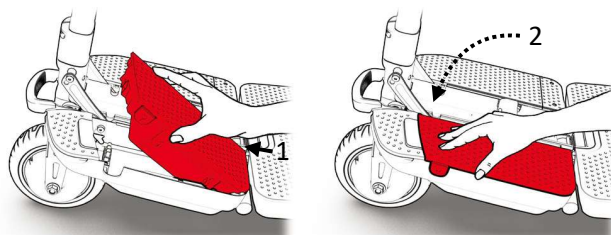


現在可以坐上ATTO了


12. 將您的手放在黑色牽引握把上，另一隻手打開高度調整桿（位於駕駛控制台前方），接著調整駕駛控制台到適合的高度，然後合上高度調整桿。

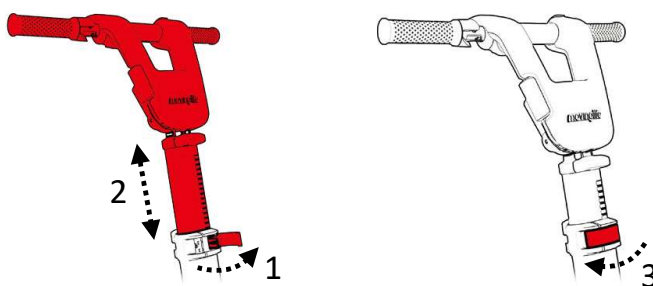

13. 把駕駛握把往外側向上提起即可打開。

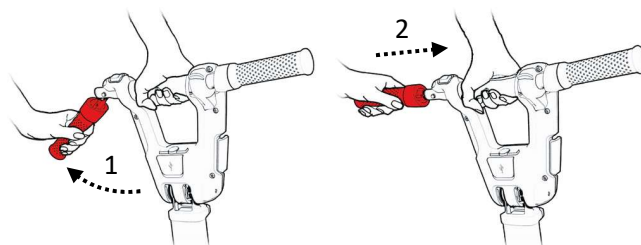


14. 現在，您可以調整駕駛控制台的角度 - 握住駕駛控制台並打開側邊調節桿到底。將角度調整至舒適駕駛模式，然後關上調節桿。

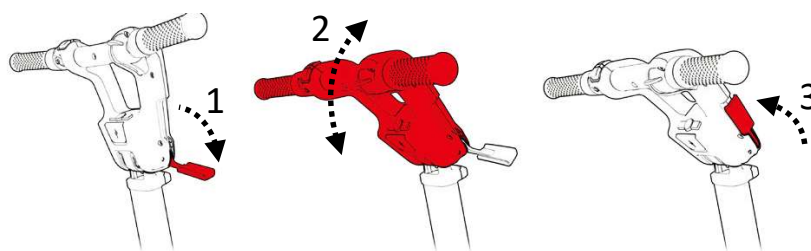

您的ATTO已準備就緒！

1. 請看ATTO的駕駛控制台，按下“開/關”電源按鈕（左下方的圖上的圓形按鈕），直到面板上燈號亮起。您看到的數字是目前設定的速度，您可以透過“+”或“-”按鈕來調整速度，我們建議以低速啟動。在左上方駕駛握把旁會看到兩個按鈕，一個是提醒喇叭按鈕，另一個是大燈按鈕；在右方駕駛握把則是行駛方向按鈕，如果按下方向按鈕，可以向前和向後更改行駛方向（在駕駛控制台面板會出現前或後箭頭的方向）。

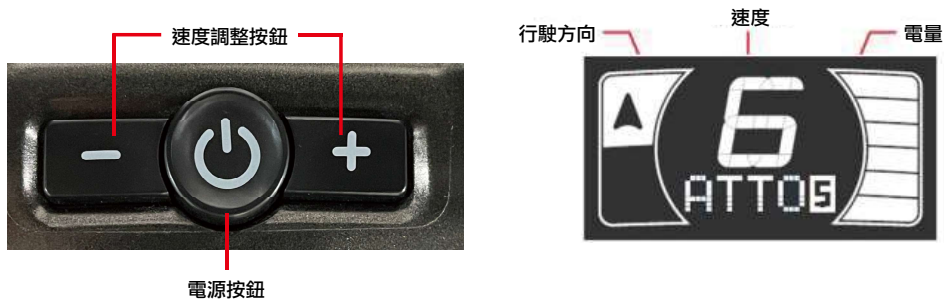


2. 用右手拇指操作油門-如果向下按到底，會是目前設定速度的最高速。可以透過按油門的程度來控制實際速度。




3. 停止-鬆開油門，ATTO就會自動煞車。

收合ATTO：


1. 首先，先關閉您的ATTO，請按下“開/關”電源按鈕，並確認指示燈熄滅。
2. 將駕駛控制台回到直立的位置：打開側邊調節桿，將控制台提起至垂直位置，然後關上調節桿。
3. 折疊駕駛握把：握住握把往外拉開，並向下折接近90度角，就會自動鎖定收合。

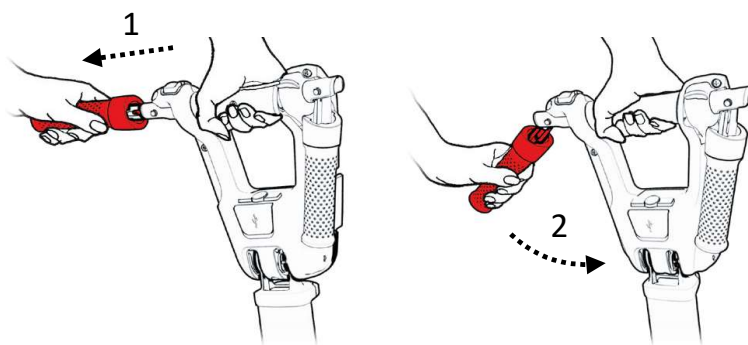


-
4. 握住駕駛控制台並打開側邊調節桿到底，將駕駛控制台輕輕向下推到底，關上調節桿。

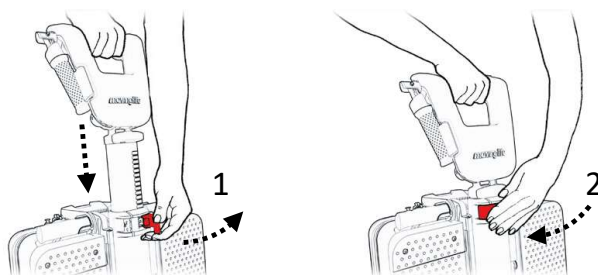

5. 接著移到椅子後面，滑動後拉桿的安全扣並同時輕鬆地將拉桿調至90度，在握住的同時將椅子向下推到底，然後將您的手放在椅背上把機體一直向下推到底。

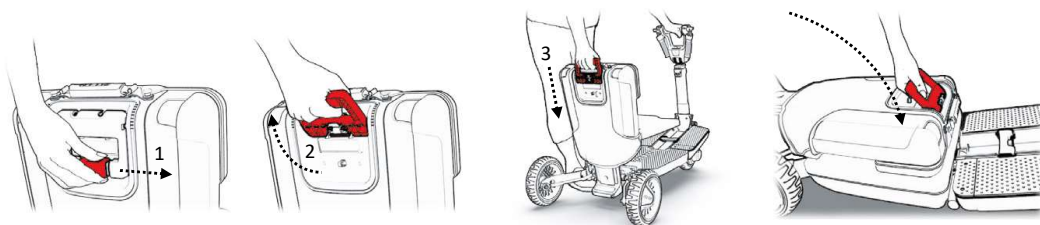


6. 走到車子前面，用一隻手握住黑色牽引握把，另一隻手將前拉桿提起打開，解開整座駕駛控制台的鎖定。然後一隻手握住黑色牽引握把，另一隻手拉起機體中間的主握把以收合ATTO。

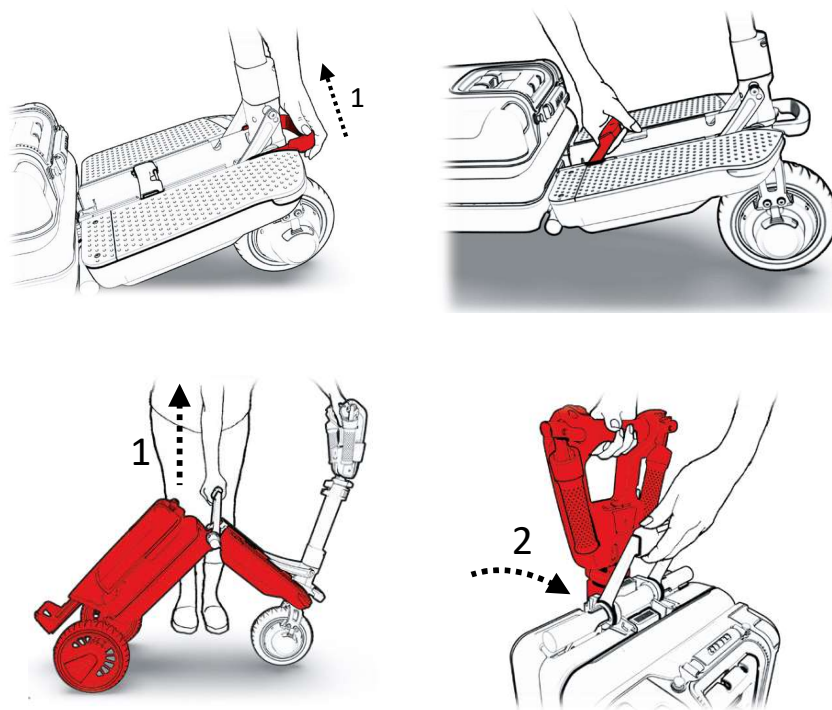


分離模式：

機體可以前後分離是ATTO最大的特色，讓您可以輕易搬上車，跟隨您到各地使用。


1. 先將ATTO收折起來，並將駕駛控制台調整至直立的位置。

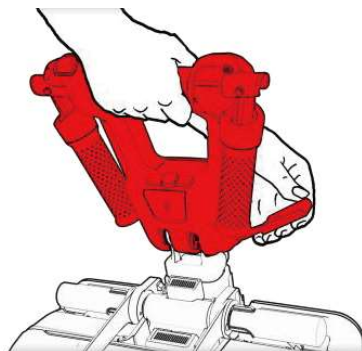


-
2. 打開兩側分離桿

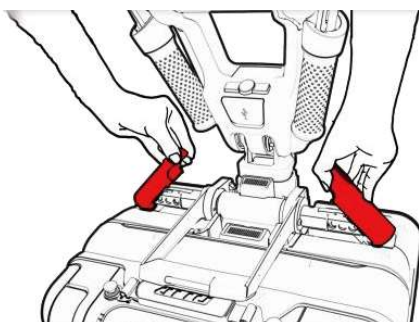


-
3. 一隻手握住駕駛控制台握把，另一手按下中央解開按鈕（紅色按鈕）

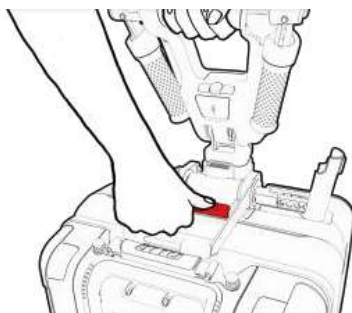

4. 即可將ATTO前後分離。

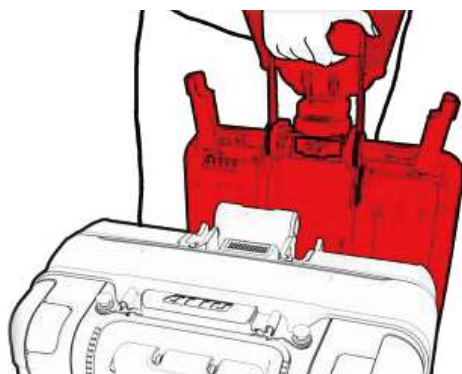

5. 在搬運時，務必兩手一上一下抓取，如下圖指示處進行搬運。

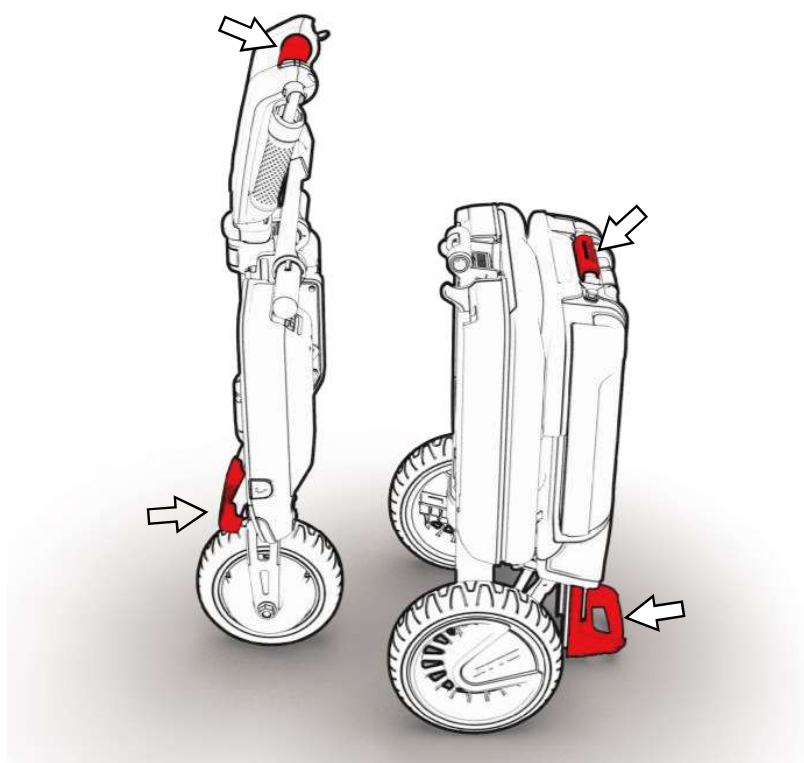

配對遙控鎖：

※ATTO SPORT如果以遙控鎖上鎖，只能以遙控鎖解除，請務必保管好您的遙控鎖

ATTO SPORT 附有2組遙控鎖，出廠時皆完成與代步車連結遙控設置，不需自行設置配對。如有需要請依照以下步驟進行：

1. 將ATTO代步車關機。
2. 同時按下“電源按鈕”和“速度調整按鈕+”數秒鐘，即可進入設定模式。
3. 進入設定模式後，按“電源按鈕”選取要設定的選項，配對遙控鎖的畫面為 (-) PAIR REMOT。



4. 按“速度調整按鈕+”讓畫面顯示 (P) PAIR REMOT，準備開始進行配對。



5. 當螢幕上的 P 閃爍時，即可長按遙控鎖的任一按鈕，直到閃爍停止，即完成配對。



6. 長按“電源按鈕”退出設定模式，您已可使用您的遙控鎖。
-

車尾警示燈：

車尾警示燈設置於車尾提把，讓您於夜間騎乘時多一份安全防護，共有三種模式“常亮”“閃爍”“關閉”。可按側邊按鈕選取模式。



充電採USB充電，您可於ATTO充電時將附贈的充電線接於ATTO車身上的USB插孔進行充電。



傳動輪（前輪）操作：

萬一電池沒電或ATTO沒有驅動時，ATTO可以調整成手動移動，這將需要釋放前輪的機械式自動煞車，將輪子側邊的調節桿推向模式"N"即可。要再次啟動駕駛之前，請確認有將調節桿推回模式"D"。



調節桿推向模式"N"，
釋放前輪的機械式自動煞車



啟動前請確認有將調節
桿推回模式"D"

定速巡航功能：

在按下油門的同時按下速度調整按鈕“+”和“-”，即可啟動ATTO代步車的定速巡航模式，可在不用按壓油門的狀態下，以最後設定的速度行駛。只要再按任何按鈕、手煞車或是壓按油門即可解除定速巡航。

※注意：在切換到定速巡航模式時，請務必確保前方道路暢通無阻，且適合所設定的速度，以免發生危險。



操作使用影片

www.smartride.com.tw/video

在我們完整的《使用手冊》或官方網站上，您可以找到有關以下方面的更多資訊，例如：如將ATTO拆分為兩部分、旅行、搭乘飛機、安全性，以及更多相關資訊。祝您安全、愉快！

本快速使用指南不能完全代替ATTO的《使用手冊》。
在操作ATTO之前，請仔細閱讀。

movinglife[™]

movinglife® ATTO新世代電動代步車

錯誤代碼說明

錯誤代碼	嚴重程度	問題原因及解決方式
E1	低	電源啟動後，若前輪調節桿處於N檔(空檔)狀態並按下電門即顯示 E1，請將前輪調節桿推回D檔即恢復駕駛模式。 
E2	低	同時按下「電源按鈕」及「電門」會使電腦進行自動保護安全模式並顯示 E2，請放開電門並重新啟動電源按鈕。
E3	高	馬達負載過多即顯示 E3，請關閉電源按鈕後10分鐘再重新啟動。
E4	低	USB連接口出現問題即顯示 E4，請移除USB連接口上的裝置、檢查USB連接口是否受潮，問題排除後重新啟動電源按鈕。
E5	高	內部線路或控制盒出現問題即顯示 E5，請與Moving Life台灣總代理-韋克有限公司的技術支援小組聯繫。
E6	低	控制盒過熱即顯示 E6，請關閉電源按鈕於10分鐘後重新啟動。
E7	低	控制盒偵測到低電壓即顯示 E7，此可能是電池電量不足所導致，請關閉電源按鈕以及將電池充滿電後再重新啟動。
E8	高	馬達故障即顯示 E8，請與Moving Life台灣總代理-韋克有限公司的技術支援小組聯繫。
Fd	無	提醒軟體需升級為最新版本即顯示Fd，請與Moving Life台灣總代理-韋克有限公司的技術支援小組聯繫。